



Guía de Usuario

Halo *Swift*



Información Importante

1. Su silla Halo™ solo debe ser utilizada por operadores capacitados.
2. La capacitación del usuario en su silla Halo™ debe realizarse de acuerdo con las pautas del fabricante, como se indica en esta guía del usuario.
3. Se recomienda la práctica trimestral con su silla Halo™ para garantizar que el personal siga estando capacitado y sea competente.
4. Se recomienda la operación de dos personas para pasajeros más pesados.
5. Solo se deben utilizar piezas originales de Halo™ al realizar el mantenimiento de la Silla de evacuación Halo™.
6. Para garantizar el rendimiento óptimo de su silla Halo™, las correas deben ser rotadas cada 3 meses.

Nota: Halo™ Evacuation no acepta ninguna responsabilidad por los daños que puedan ocurrir cuando la silla está en uso.



UNA PROMESA DE POR VIDA

Halo™ Evacuation ofrece una garantía de por vida.

Para condiciones completas,
por favor visite nuestro sitio web
haloevacuation.com



Contenido

- 4-5 Información General
- 6-7 Despliegue
- 8-9 Transferencia
- 10-13 Descenso
- 14 Funciones Especiales
- 15 Instalación
- 16 Inspección Visual
- 17 Accesorios



Halo Swift™

Halo Swift™ es una silla de evacuación ligera, diseñada para la operación de una sola persona. Su exclusivo sistema de rodamiento proporciona una evacuación suave y controlada, tanto para el operador como para el pasajero. Con empuñaduras antideslizantes en el mango, Halo Swift™ proporciona estabilidad cuando el pasajero se está transfiriendo a la silla de evacuación y al descender las escaleras.

Especificaciones

	Doblar	Desdoblar
Altura	43.3"/1100mm	53.2"/1350mm
Ancho	20.5"/520mm	20.5"/520mm
Profundidad	9.4"/240mm	44.9"/1140mm
Peso (sin carga)	24lbs/11kg	
Capacidad de carga	400lbs/182kg	
Angulo de escalera	28° - 40°	
Ancho de asiento	20.1"/510mm	
Profundidad de asiento	15.8"/400mm	
Soporte de respaldo	13"/330mm	
Ancho de soporte	17.7"/450mm	
Espacio mínimo de llegada	39.4" x 39.4"/1000mm x 1000mm	




CARGA SEGURA DE USO



SOLO PARA BAJAR



NO APTO PARA ESCALERAS DE CARACOL

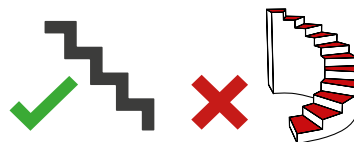

MANTENIMIENTO (MUY RECOMENDADO)



ENTRENAMIENTO (MUY RECOMENDADO)



GARANTÍA DE POR VIDA



CONTACTE CON NOSOTROS

CONTACTE CON NOSOTROS

Para mas información visite: haloevacuation.com

RECOMENDACIONES




*Se recomienda la operación de dos personas para pasajeros más pesados


ÁNGULO DE ESCALERA









ANCHO MÍNIMO PERMITIDO DE ESCALERA

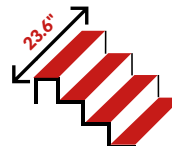


*Para evacuación hacia arriba, escaleras de caracol y escaleras estrechas, hay otros modelos disponibles, visite haloevacuation.com

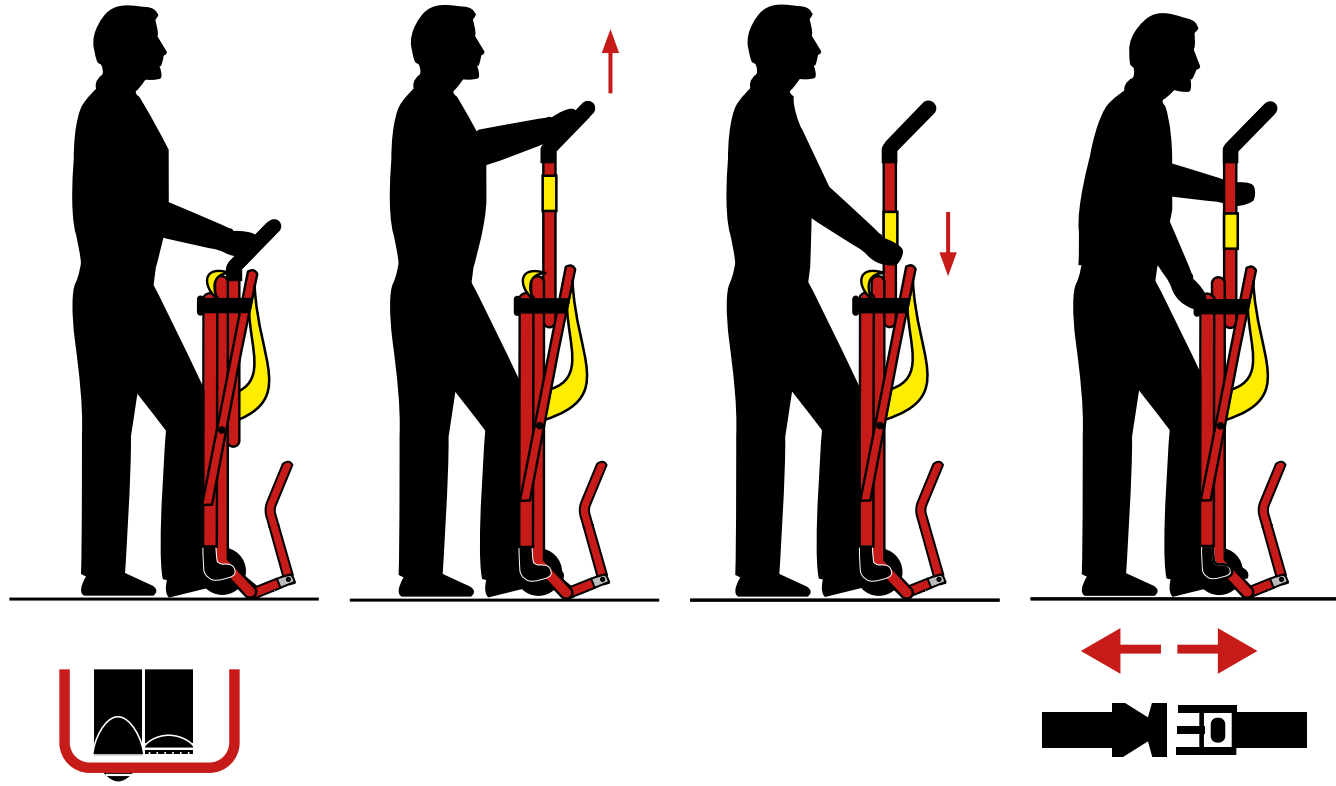


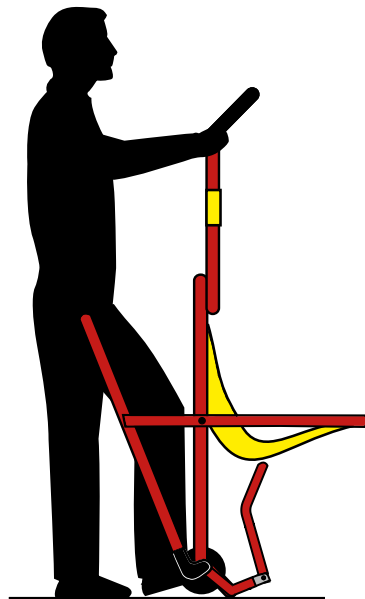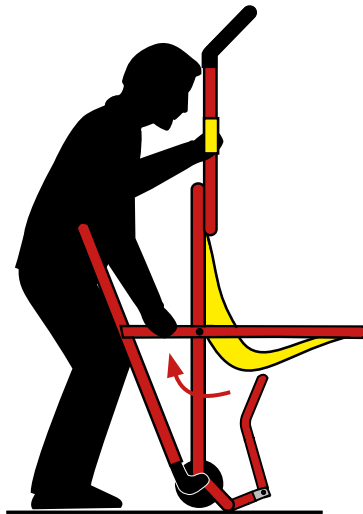
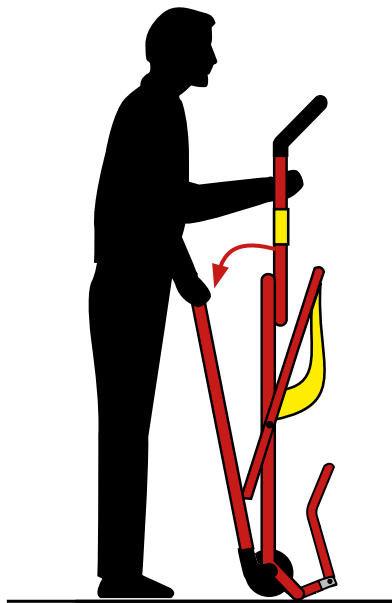


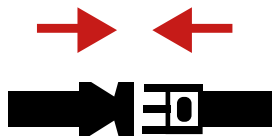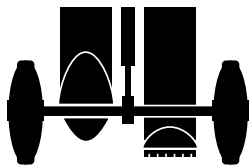
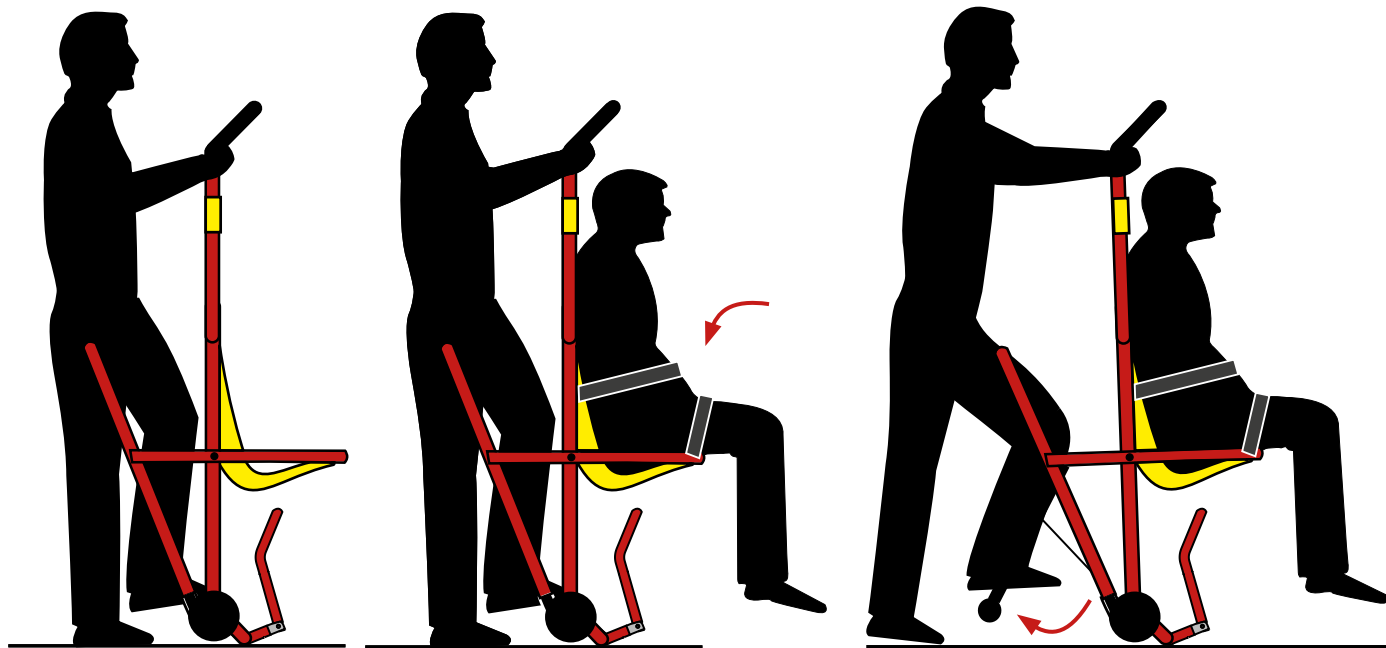



X2

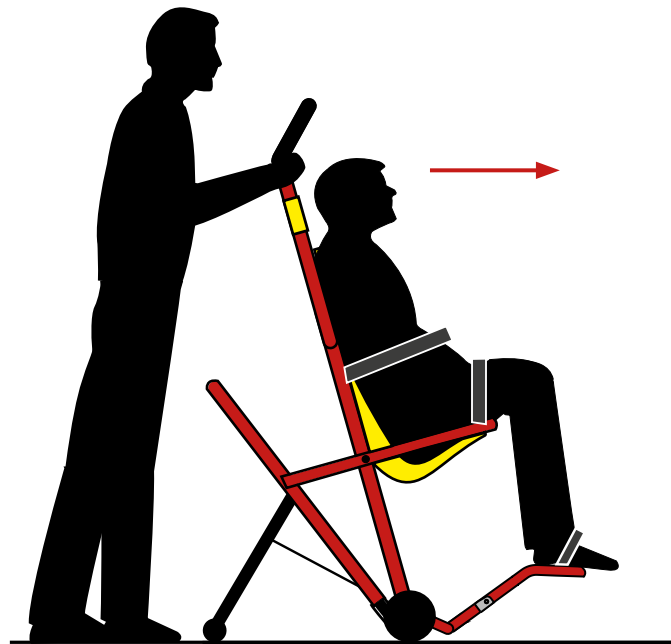

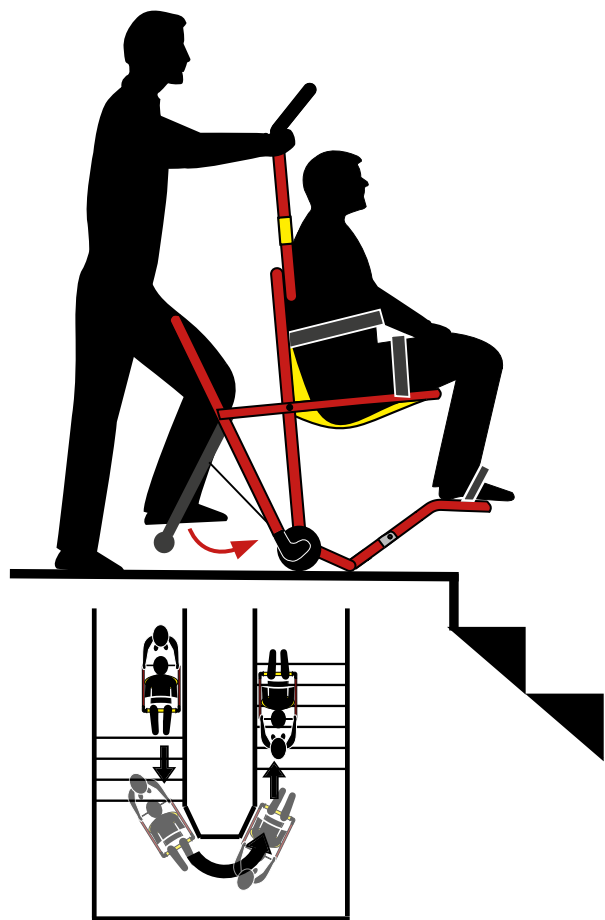


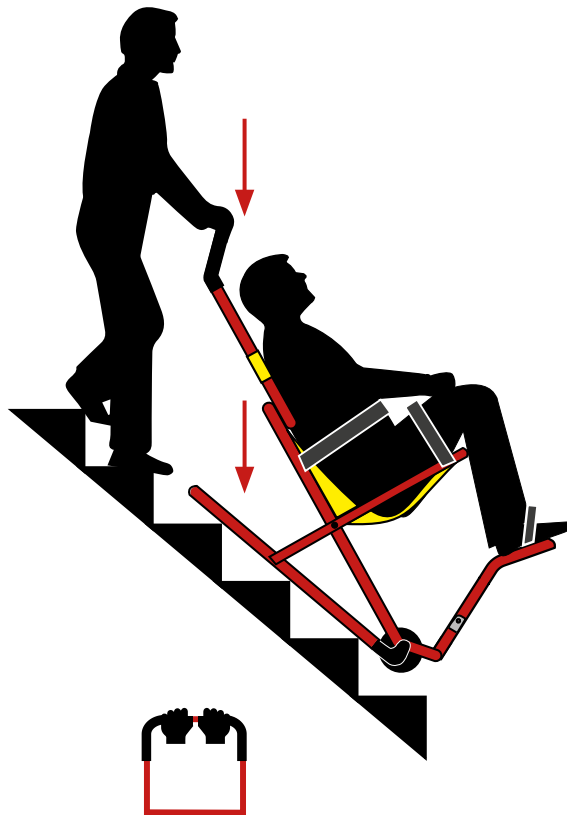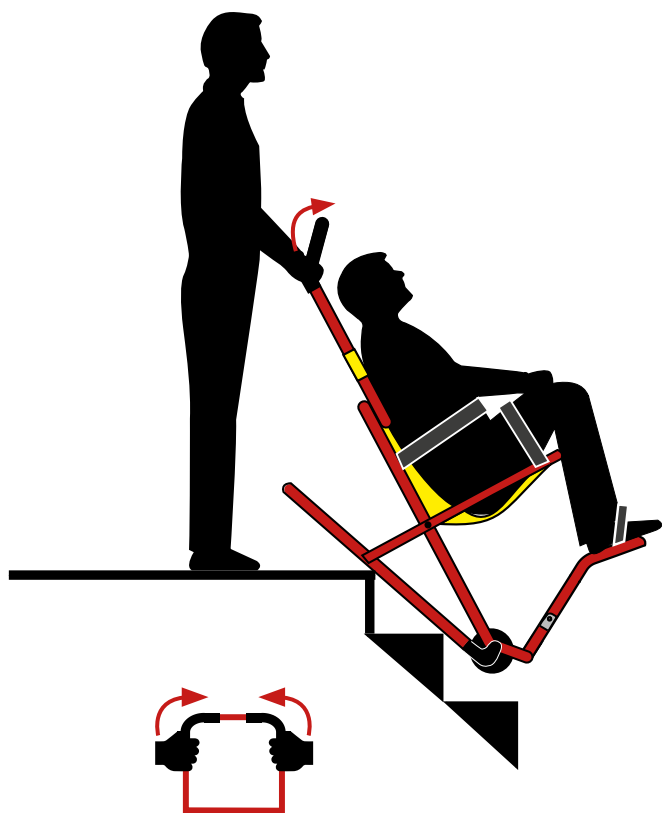

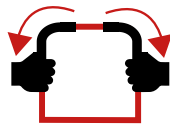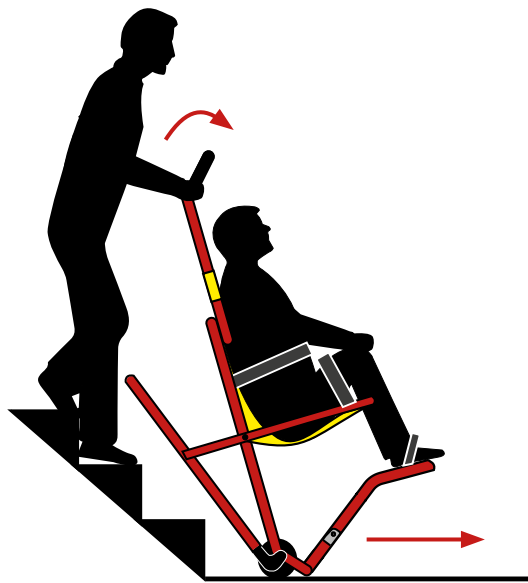


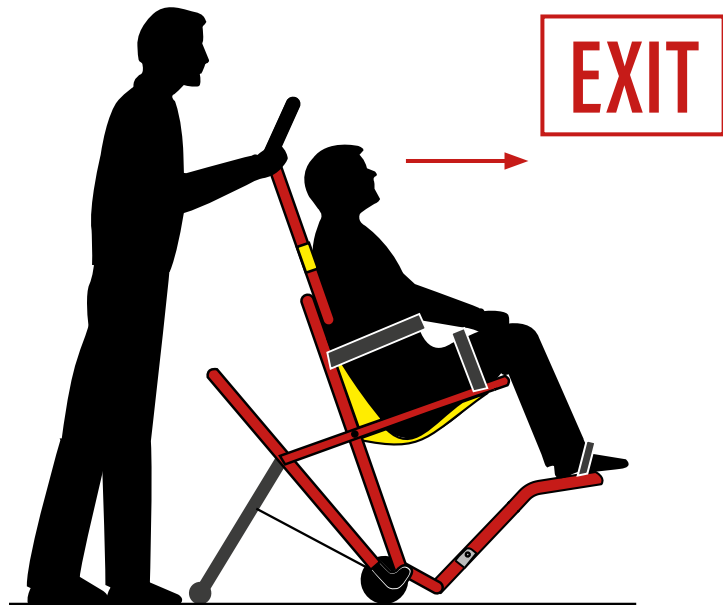

Ruedas traseras con freno

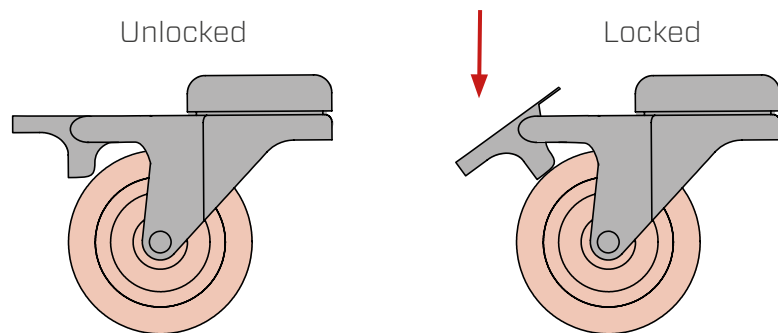


Reposacabeza

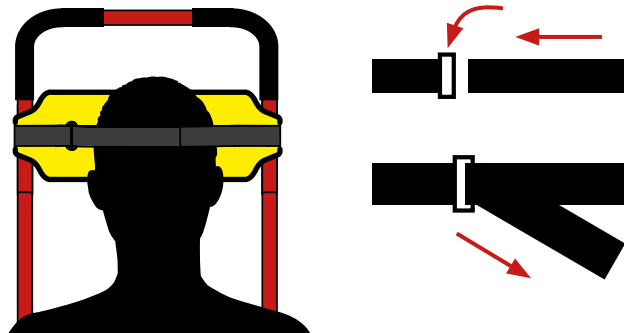

Bloqueada

Coloque su silla en un lugar seguro para un despliegue rápido

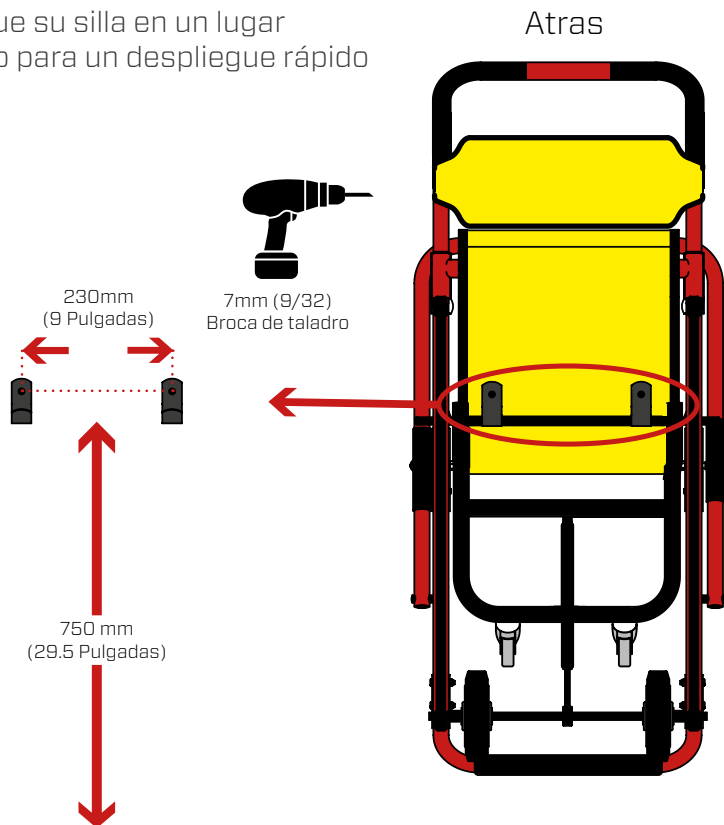

INSTALACIÓN



Halo™ Evacuation o un distribuidor autorizado, puede instalar su silla de evacuación, así como brindar asesoramiento y orientación de expertos sobre las ubicaciones más efectivas dentro de su edificio.



haloevacuation.com

Solo con fines ilustrativos.

Halo™ Evacuation recomienda que se revise lo siguiente cada tres meses.

DESPLIEGUE/ALMACENAMIENTO



- + Asegúrese de que el despliegue de la silla sea fluido
- + Sin interferencias cuando la silla está desplegada o guardada
- + Asegúrese de que el pie de apoyo se extienda y se retraiga correctamente

COMPROBAR RUEDAS



- + Sin grietas en la rueda o el cubo
- + Sin partición de ruedas
- + Sin mal funcionamiento del freno de rueda giratoria
- + Asegúrese de que las ruedas estén libres para girar sin impedimentos

COMPROBAR HAMACA



- + Sin hilos obvios alrededor de las costuras
- + No se rompe el material de la hamaca
- + Verifique que la hebilla del cinturón funcione correctamente

COMPRUEBE EL REPOSACABEZAS



- + Sin hilos obvios alrededor de las costuras
- + No se rompe el material del reposacabezas
- + Asegúrese de que el reposacabezas esté libre para moverse a lo largo del mango

COMPROBAR CINTURONES



- + Rotar cada 3 meses
- + Sin grietas ni rasgaduras profundas
- + Sin grandes jorobas ni abultamientos severos

COMPROBAR REPOSA PIES



- + Asegurarse de que el reposapiés se despliegue y guarda correctamente



Comuníquese con Evacuación de Halo™ o con un distribuidor **inmediatamente** si cualquiera de estos defectos aparecer en su silla, o si tiene alguna inquietud.

**CARTEL
FOTOLUMINISCENTE**



PATIENT CARRIER



ALARMA CONTRA ROBO



COMFY SEAT



**ARMARIO DE
ACERO**



**HALO™ EVACUATION
SOPORTE**



Para mas información visite:
haloevacuation.com

Guia de usuario online

Halo™ Evacuation Guías de usuario disponibles en:

✓ **INGLES**

✓ **ESPAÑOL**

Para mas información visite:

haloevacuation.com



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.



Halo™ Evacuation

70 West Madison Street, Suite 5750, Chicago, IL 60602-4213

inquiries@haloevacuation.com

haloevacuation.com | +1 866-416-2955

